

Наименование документа: Контейнер для сбора спермы 125 мл с этикеткой		Дата выпуска: 29.10.2019
ID формы: TF02-A-A8 – Инструкция по применению		Пересмотр 001

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СБОРА СПЕРМЫ 125 мл с этикеткой

Перед любым использованием прочитайте инструкцию.

Контейнер для сбора спермы 125 мл с этикеткой производства BIRR – одноразовый и стерильный, предназначен для диагностических целей и процедур ВРТ; каждая партия тестируется на эмбрионах мышей (МЕА), бактериальные эндотоксины (LAL) и тест на подвижность сперматозоидов (SMA).

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Для сбора спермы в диагностических целях или для вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- Инфекции и их клиническое лечение могут нарушить сперматогенез. Рекомендуется отложить анализ спермы, если инфекция имела место в течение последних трех (3) месяцев и привела к высокой температуре (>38 градусов Цельсия), так как анализ может быть не показательным по отношению к средним показателям сперматогенеза.
- Не используйте контейнер для сбора спермы для других целей, кроме хранения образца. Избегайте прямого контакта пластикового контейнера с гениталиями.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Сохраняйте внутреннюю поверхность контейнера стерильной до момента сбора образца.
- В случае применения лекарственных препаратов, пожалуйста, сообщите об этом персоналу клиники репродукции. Некоторые лекарства негативно влияют на качество спермы.
- Перед получением образца спермы необходимо вымыть руки и область гениталий с использованием антибактериального мыла. Перед тем как тщательно высушить область, необходимо удалить все мыло и его остатки, так как мыло может быть токсичным для сперматозоидов.
- В случае получения образца путем прерванного полового акта, попросите силиконовый презерватив или аналогичный неспермицидный презерватив. Презерватив можно безопасно хранить внутри контейнера.
- В случае необходимости использования лубриканта, запросите подходящий продукт в клинике, так как некоторые лубриканты обладают спермицидной функцией или могут серьезно повлиять на физиологию сперматозоидов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

- Контейнер для сбора спермы передается пациенту-мужчине. Этот контейнер должен быть предварительно промаркирован клиникой. Пациент должен убедиться, что его данные правильно указаны на этикетке.
- Для получения оптимальных результатов пациент-мужчина должен соблюдать период воздержания в течение 2-3 дней до получения образца.
- Как правило, пациент-мужчина получает образец спермы путем мастурбации. В особых обстоятельствах может быть организовано получение образца путем прерванного полового акта или электроэякуляции. Если пациент живет недалеко от клиники (в пределах одного часа езды), образец может быть получен на дому. Контейнер с образцом необходимо доставить в клинику в вертикальном положении и при температуре тела.
- Если эти требования не могут быть соблюдены, образец должен быть получен в клинике. В большинстве клиник по лечению бесплодия есть специальные комнаты для получения образцов спермы.
- Пациент получит инструкции от персонала клиники о том, как получить образец спермы.
- Как правило, ему будет рекомендовано следующее:
 - о Помочиться и ополоснуть половой член проточной водопроводной водой.
 - о Высушить половой член бумажным полотенцем.
 - о Согреть контейнер до температуры тела (например, держа контейнер между ладонями).
 - о Снять крышку с контейнера.

Наименование документа: Контейнер для сбора спермы 125 мл с этикеткой		Дата выпуска: 29.10.2019
ID формы: TF02-A-A8 – Инструкция по применению		Пересмотр 001

- o Получить образец спермы путем мастурбации, эякулируя непосредственно в контейнер.
- o Закрывать контейнер крышкой.
- o Написать на контейнере время получения образца.
- o Передать контейнер сотрудникам клиники по лечению бесплодия.
- Обычно после эякуляции сперма застывает, а затем повторно разжижается в течение 20 минут.
- В клинике по лечению бесплодия образец спермы обычно обрабатывается в течение часа после эякуляции.

ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ: О побочных реакциях, связанных с использованием контейнера для сбора спермы, не сообщалось.

ГАРАНТИЯ: Производитель не несет ответственности за любой ущерб, возникший в результате неправильного использования, неправильной эксплуатации или несоблюдения предостережений и инструкций, содержащихся в данной инструкции или инструкции по эксплуатации совместимого медицинского оборудования.