

## QuickTest BT Ca


## QuickTest BT Ca



## Бланк результатов теста на определение группы крови лошади

ПЕРВИЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ДОНОРА: В coomsemcmsuu с общепринятой практикой, мы рекомендуем проводить анализ крови дважды, используя 2 набора / 2 образца крови / 2 лаборанта.

Кличка пациента:		
Идентификационный №:		
Владелец :		
Группа крови: 🔲 СА+	■ CA-	Пробирка с кро с АСD/СРД/ЭД Не используй гепарин!
Исследование провел:	Ветеринарный врач	(10 µL) Используйте 10 мкл цельно крови или рRB (при анемии)
Дата:		
QT № лота:		
СОВМЕСТИМОСТ	Ь ГРУПП КРОВИ	

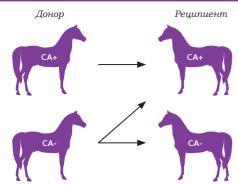

Стрелками показаны совместимые трансфузии.

## Перед каждым переливанием крови

- Всегда проверяйте совместимость крови CA между донором и пециписытом
- Для всех других групп крови: проведите тест на перекрестную совместимость (XM) между донором и реципиентом.













www.celldiagnostic.by

nm@celldiagnostic.by