



QuickTest BT Ca

ПЕРВАЯ ДОНАЦИЯ: В соответствии с общепринятой практикой, мы рекомендуем проводить анализ крови дважды, используя 2 набора / 2 образца крови / 2 оператора.

QuickTest BT Ca



Кличка пациента:

Идентификационный №:

Владелец:

Группа крови: CA+ CA-

Исследование провел:

Ветеринарный врач


Дата:

QT № лота:

СОВ ЕСТИ ОСТ ГР ПП КРОВИ

Донор

Реципиент

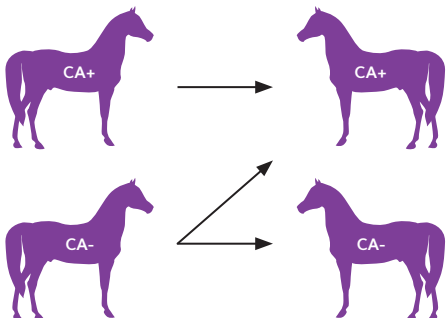

Стрелками показаны совместимые трансфузии.

Перед каждым переливанием крови

- Всегда проверяйте совместимость крови CA между донором и реципиентом.

- Для всех других групп крови: проведите тест на перекрестную совместимость (XM) между донором и реципиентом.

Я согласен быть донором крови

1. Подготовка пробирки.
2. Добавление крови.
3. Использование 10 мкл цельной крови или rRBC (при анемии).
4. Вращение пробирки (7 сек.).
5. Вставка пробирки в устройство.
6. Проверка заполнения.
7. Ожидание заполнения теста жидкостью (от 2 до 5 мин).
8. Чтение результата.

ЧИТАТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ ТЕСТИРОВАНИЯ

C = контрольная линия

+

Слабая Ca линия
= Положительный результат

-

Белая Ca линия
= отрицательный результат

! Пожалуйста, свяжитесь с нами В "Процедура устранения неисправностей"

Alvedia
Alice Veterinary Diagnostic

www.alvedia.com
contact@alvedia.com