



# QuickTest BT A+B

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУППЫ КРОВИ КОШКИ БЛАНК РЕЗУЛЬТАТА АНАЛИЗА

Кличка пациента: .....

Идентификационный №: .....

Владелец: .....

Группа крови:  A  B  AB


Исследование провел: .....

Дата: .....

QT № лота: .....

Ветеринарный врач

### СОВМЕСТИМОСТЬ ГРУПП КРОВИ

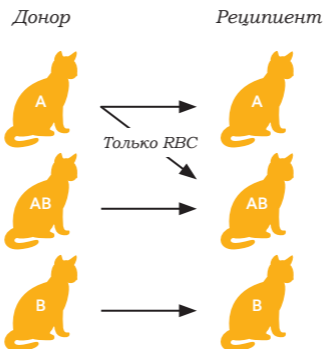

Совместимые трансфузии указаны стрелками.

#### Перед каждым переливанием крови:

- Всегда проверяйте совместимость крови AB между донором и реципиентом.
- Для всех других групп крови: проведите тест на перекрестное соответствие (XM) между донором и реципиентом.

Я согласен быть донором крови



Сканируйте для считывания результата анализа

# QuickTest BT A+B



## ПЕРВИЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ДОНОРА:

В соответствии с общепринятой практикой, мы рекомендуем проводить анализ крови дважды, используя 2 набора / 2 образца крови / 2 лаборанта.

- 1**
- 2**
- 3**

\*Пробирка с кровью с АСД/СРД/ЭДТА. Не используйте гепарин!

Используйте 10 мкл цельной крови или рRBC (при анемии).

10 μL
- 4**

7 сек
- 5**
- 6**
- 7**

Дождитесь заполнения теста жидкостью

От 2 до 5 мин
- 8**

### РЕЗУЛЬТАТ ДОЛЖЕН БЫТЬ СЧИТАН СРАЗУ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА

C = контрольная линия

**A**




белая линия = отрицательный результат

**B**



белая линия = отрицательный результат

**AB**

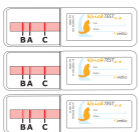

слабая линия = положительный результат



При получении некорректных результатов свяжитесь с нами!

Alvedia  
Alice Veterinary Diagnostic

www.celldiagnostic.by  
nm@celldiagnostic.by